

## משקל אדם דיגיטלי ביתי LOT-2008C

### מאפיינים:

- טווח שקילה – 5-180 ק"ג
- טווח רגישות – 100 גרם
- מסך תצוגה דיגיטלי (4 ספרות)
- בטריות: 3V Cr2032 Li
- יחידות משקל : Kg/lb
- כיבוי אוטומטי לאחר כ- 10 שניות
- במידה והסוללות חלשות יופיע על גבי הצג הסימן "Lo"
- במידה והשקילה אינה תקינה יופיע על גבי הצג הסימן "Erro"

### הוראות הפעלה:

פתחי את בית תושבת הסוללה בחלק האחורי של המשקל. הכנס את הסוללה העגולה. בצמוד לסוללה נמצא מתג הפעלה המסומן "Kg-off-lb". העבר את מתג ההפעלה ליחידת המשקל הרצויה.

לאחר הפעלת המשקל יופיע על הצג 0.0kg.

יש להניח את המשקל על משטח קשיח וישר ולעמוד עם שתי רגליים על המשקל הדיגיטלי, עד הצגת המשקל במסך התצוגה.

בסיום השקילה הצג ייכבה אוטומטית תוך כ- 10 שניות.

במידה והשקילה אינה תקינה יופיע על גבי הצג הסימן "Erro".

במידה והסוללות חלשות יופיע על גבי הצג הסימן "Lo".

### אזהרות:

החזקי את המשקל בסביבה יבשה והרחק אותו ממים. אין לנקות את המשקל עם מים.

במידה ופני המשקל רטובים – אנא עלה עליו בזהירות על מנת למנוע החלקה.

במידה והמשקל אינו בשימוש אין להניח עליו חפצים.

יש להימנע מקפיצות על גבי המשקל.

שירות לקוחות דין דיאגנוסטיקה לשירותך 1800-333-636